



## *DermaPrep*.<sup>TM</sup>

### PRODUCT INFORMATIE EN GEBRUIKSAANWIJZING

#### ACHTERGROND

*DermaPrep*<sup>TM</sup> is gebouwd als een steriele dubbellaagige (een zachte en een schurende laag) spons met een ingebed irrigatie systeem. Na opening van de steriele verpakking wordt *DermaPrep*<sup>TM</sup> door middel van een infusie set of een gelijkaardige regulerende tube aangesloten aan een container (zak of fles) steriele zoutoplossing (of water). Na opening en regeling van het debiet via de valve kan de spons gebruikt worden om de getroffen weefsels te kuisen terwijl de gewenste hoeveelheid vloeistof wordt toegediend. De zachte zijde wordt gebruikt om voorzichtig te kuisen waar de ruwe zijde gebruikt wordt voor een grondig kuisen en verwijderen van vreemd materiaal. De spons wordt na elk gebruik over een schaal uitgeperst en daarna terug gevuld met nieuwe, reine en steriele reinigingsvloeistof. De hoeveel en aard van de reinigingsvloeistof wordt zo éénvoudig gecontroleerd. De benodigde hoeveelheid vloeistof is minimaal en het volledige volume wordt efficiënt gebruikt om de oppervlakte van de huid te kuisen zonder enig verlies of afdruipe over de randen.

#### VERPAKKING EN STERILIZATIE

- § *DermaPrep*<sup>TM</sup> is verpakt in een zak en is gesteriliseerd met Ethyleen Oxide.
- § De inhoud van de zak is steriele behalve als de verpakking geopend of beschadigd is.
- § *DermaPrep*<sup>TM</sup> is een hulpmiddel voor éénmalig gebruik. Geen hersterilizatie.

#### INDICATIES

*DermaPrep*<sup>TM</sup> wordt gebruikt voor het kuisen van de huid en wonden.

#### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Open de verpakking en neem de *DermaPrep*<sup>TM</sup> er uit
2. Verwijder de kap van de vrouwelijke luer lock.
3. Verbind de luer lock aan de I.V. lijn
4. Sluit de I.V. lijn aan op een bron van steriel water of een zoutoplossing.
5. Open de klem en laat de vloeistof in de *DermaPrep*<sup>TM</sup> vloeien.
6. De natte *DermaPrep*<sup>TM</sup> wordt gebruikt om de huid te schrobben en te kuisen. Gebruik eerst de zachte zijde. Gebruik daarna de ruwe zijde voor een grondigere kuisbeurt.
7. Controleer de stroomsnelheid van de vloeistof door middel van de rolklem.
8. Knijp de *DermaPrep*<sup>TM</sup> uit boven een reservoir om het vuil van de oppervlakte van de spons te verwijderen.

#### VOORZORGEN EN WAARSCHUWINGEN

Uitsluitend voorbehouden voor gebruik door bevoegd medisch of para – medisch personeel.

Manufacturer: 4Med Ltd.. P.O.B 489 Kfar-Sava 44104 Israel. Tel 972-9-7425984, Fax 972-9-7427598  
EC Authorized representative: MEDNET GmbH, Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany