



DermaPrep.™

PRODUKTINFORMATION UND GEBRAUCHSANLEITUNG

ALLGEMEIN

DermaPrep™ besteht aus einem sterilen zweilagigen Schwamm (weich/abrasiv) mit einem integrierten Spülsystem. Nach Öffnen der Hülle wird das sterile **DermaPrep™** mittels eines Infusionsbestecks an eine Flasche oder einen Beutel Kochsalzlösung oder Wasser angeschlossen. Nach Öffnen und Regulieren des Durchflußventils „liefert“ der Schwamm die zum Reinigen des betroffenen Gewebes notwendige Menge an Flüssigkeit. Der weiche Schwamm wird für ein moderates Reinigen, die abrasive Seite für eine gründlichere Reinigung von Fremdkörpern verwendet. Der Schwamm wird nach jedem Gebrauch in einen Behälter ausgedrückt und danach mit neuer, sauberer und steriler Flüssigkeit gefüllt. Die Menge und Art der Reinigungsflüssigkeit kann leicht kontrolliert werden. Die Menge der benötigten Flüssigkeit ist minimal und die verfügbare Menge wird effizient für das Reinigen der Hautoberfläche, ohne jeden Verlust und ohne Verschütten, genutzt.

VERPACKUNG UND STERILISATION

DermaPrep™ ist in einen Blister verpackt und mit Äthylennoxid sterilisiert

Die Blisterpackungen sind steril bis sie geöffnet oder beschädigt werden

DermaPrep™ ist für **einmaligen** Gebrauch konzipiert – **nicht resterilisieren!**

INDIKATION

DermaPrep™ ist für die Reinigung von Haut und Wunden konzipiert.

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie das **DermaPrep™**
2. Entfernen Sie den Deckel des Luer-Lock-Anschlusses
3. Verbinden Sie den Luer-Lock-Anschluß mit dem Infusionsbesteck
4. Verbinden Sie das Infusionsbesteck mit der Flasche oder dem Beutel mit der Reinigungsflüssigkeit
5. Öffnen Sie das Flüssigkeitsventil und lassen Sie die Reinigungsflüssigkeit in den Schwamm fließen
6. Wischen und reinigen Sie mit dem nassen **DermaPrep™** die Haut. Verwenden Sie zuerst die weiche Seite. Für eine kräftigere Reinigung verwenden Sie die abrasive Seite
7. Regulieren Sie die Flüssigkeitsmenge mit Hilfe des Flüssigkeitsventils
8. Drücken Sie den **DermaPrep™** in einen Behälter aus um den Schmutz von der Oberfläche zu entfernen.

Hersteller: 4Med Ltd., Nahal-Oz 85145 Israel, Tel. 972-8-6805223, Fax 972-8-6805231
info@4med.co.il, www.4med.co.il

EC Authorized representative: Ozat EU, Westfaelische Strasse 169A 44309 Dortmund, Germany